

クイックスタートガイド

電池の入れ方と交換について
本体には内蔵電池が入っていません。電池を入れてからお使いください。

10 カスタマーサービス

製品やサービスに関するご意見をお聞かせください。

輸入販売元
株式会社エントリージャパン

東京都新宿区新宿6-12-5 新宿松喜ビル

TEL:03-5362-3383 info@entry-japan.com

URL:www.entry-japan.com



ドクターレッド事業部



4 ご使用にあたり

最大限の効果を得るために継続してご使用ください。1日2回、5~6時間あけご使用をおすすめします。最新の研究では、2週間の継続使用で効果が得られることが確認しています。しかしながら、効果には個人差がありますのでご了承ください。

5 使用方法

使用前

- 水またはぬるま湯で湿らせた布でプローブカバーを拭いてください。
- 液体の侵入を防ぐため、必ずプローブカバーを装着した状態でご使用ください。

1. 「On/Offボタン」を1秒間押すと、プローブの先端が赤く光ります。
2. 本体両脇にある「調整用ボタン」を押しながら、プローブ先端を広げて鼻孔にプローブを挿します。
3. 電源は3分後に自動的に切れます。

11

Model No:MC-004

6 使用後

- プローブカバーを取り外します。使用毎にプローブカバーを洗浄してください。
- 使用前同様、水またはぬるま湯で湿らせた布でプローブカバーを拭き、乾燥後、専用ケースに収納してください。

注意

- 「On/Offボタン」を1秒間押し続けることで、本体の電源をいつでも切ることができます。
- 使用中に気分が悪くなった場合、または痛みを感じた場合は、直ちに使用を中止してください。不快感が続く場合は、医療機関へ受診してください。

1. 「On/Offボタン」を1秒間押すと、プローブの先端が赤く光ります。
2. 本体両脇にある「調整用ボタン」を押しながら、プローブ先端を広げて鼻孔にプローブを挿します。
3. 電源は3分後に自動的に切れます。

5

6

7 お手入れと保守

- 本品を長期間使用しない場合は、電池を外してください。電池が液漏れすると、本体を損傷する恐れがあります。
- お手入れは、糸くずがない布を水またはぬるま湯を混ぜ、軽く拭いてください。本品のクリーニングに化学物質を使わないでください。

8 保管方法

- 使用後はお子様の手の届かない場所に保管してください。
- 直射日光を避け、涼しく湿気の少ない場所に保管してください。
- 本品の上に重いものを置かないでください。

9 電池について

- 専用の電池のみをお使いください。
- 電池はお子様の手の届かない場所に保管してください。
- 電池が液漏れして皮膚や目に入った場合は、直ちに大量の水で洗ってください。
- 本品をご使用されない場合も最適使用のため12ヶ月ごとに電池を交換してください。

10 トラブルシューティング

- 電源が入らない場合:電池が正しく入っているか極性(+)を確認してください。プラス(+)の面を上にし、電池2個を重ねて入れてください。または電池切れの可能性があります。新しい電池と交換してください。
- 電源は入るが3分以内に電源が切れてしまう場合:電池残量が少なくなっている可能性が考えられます。点滅とともにビビッとエラー音が鳴ります。新しい電池と交換してください。

11 仕様

- 商 品 名: 鼻ヘルパー
内 容 品: プローブカバー付き本体、コイン型リチウム電池(CR2032)4個、交換用プローブカバー1ペア
取扱説明書
照 射 光: 赤色光: 660±5nm
近赤外線: 940±5nm(ナノメートル)
本体サイズ: 60×44×21mm
本 体 重 さ: 22g(電池含む)
材 質: 本体: ABS樹脂
プローブカバー:シリコーン
使 用 環 境: 温度5°C~40°C/相対湿度30%~80%
保 管 環 境: -20°C~55°C/相対湿度90%(結露のないこと)
電 池 寿 命: 約15日(3分1日2回使用時)
製 造: 中国
注意: 仕様は予告なく変更されることがあります。

12 鼻ヘルパーの図記号の説明

- IP22 製造元
CE EU加盟国基準適合
BFタイプ製品
注意!
ER EN 62471:2008
IP22 保護等級規格

13 禁忌

- ベースメーカーなど体内埋め込み型医療機器を使用している方には適していません。
- 組織が未成熟であるため、6歳未満のお子様には適していません。
- 本品の分解、改造は絶対に行わないでください。
- 本品を水や液体に浸さないでください。

14 注意

- 不整脈のある方はご使用前に主治医にご確認ください。
- 16歳未満のお子様が本品を使用する場合、必ず大人の監督のもとご使用ください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 鼻腔にポーピーがある、鼻粘膜の敏感な方には適していません。
- 光学機器(例えはメガネ)を使用する場合でも、放出された光線を直接見ないでください。
- 可燃性ガスまたは麻酔ガスの近くで使用しないでください。